

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ihr Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal hat Ihnen das sauerstoffsparende OXYMIZER-Gerät verschrieben. Der Oxymizer hilft, Sauerstoff zu sparen, durch ein Reservoirsystem, das die Speicherung von Sauerstoff während der Ausatemungs- und Pausephase des Atemmusters einer Person ermöglicht. Bei richtiger Verwendung versorgt Sie dieses Gerät mit dem Sauerstoff, den Sie benötigen, während es auch einige zusätzliche Vorteile bietet.

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes genau befolgen, wenn Sie den OXYMIZER verwenden:

- Der OXYMIZER ersetzt Ihre Standard-Nasenkanüle und ist für die Verwendung mit Sauerstoffsystemen mit kontinuierlichem Durchfluss ausgelegt.
- Die Verwendung des OXYMIZERS ermöglicht es Ihnen, den von Ihrem Sauerstoffsystem (z. B. Zylinder, Sauerstoffkonzentrator und Standard-Nasenkanüle) abgegebenen Sauerstoffdurchfluss zu reduzieren, ohne die Menge an Sauerstoff zu reduzieren, die an Ihren Körper abgegeben wird. Die Verringerung des kontinuierlichen Sauerstoffdurchflusses kann bis zu 75% im Vergleich zur Verwendung einer Standard-Nasenkanüle betragen. Dies kann in Abhängigkeit des Literflusses und des Atemmusters des Benutzers variieren.
- Falls Sie den OXYMIZER mit einem tragbaren Sauerstoffsystem (z. B. einem Zylinder) verwenden, ermöglicht die Verringerung des Durchflusses in der Regel eine längere Lebensdauer des Systems. Dies kann Ihnen ermöglichen, sich für eine längere Zeit von Ihrer Haupt-Sauerstoffquelle entfernt aufzuhalten und/oder die Verwendung eines kleineren, leichteren, tragbaren Systems zu gestatten.

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE ANWEISUNGEN IHRES ARZTES GENAU BEFOLGEN IM HINBLICK AUF:

- Die Details Ihrer verschriebenen Sauerstoffzufuhr, einschließlich wann und wie lange pro Tag sie anzuwenden ist.
- Die zu verwendende Sauerstoff-Durchflussrate in Litern.

HINWEIS: Die zur Verwendung mit dem OXYMIZER-Gerät ratsame Durchflussrate kann ein Viertel bis zur Hälfte desjenigen Sauerstoff-Literflusses betragen, der zur Verwendung mit einer Standard-Nasenkanüle verordnet wird.

- Wann Ihr OXYMIZER-Gerät ersetzt werden muss.


ANBRINGEN DES OXYMIZER PENDANT

1. Wickeln Sie den Schlauch vollständig ab. Halten Sie das Gerät so, dass die Vorderseite des Pendant von Ihnen weg zeigt.

HINWEIS: Die Vorderseite des Pendant ist mit Schlitzen ausgelegt.




2. Positionieren Sie die Nasensonden so, dass sie bequem in Ihre Nasenlöcher passen. Die Sonden sollten gut in den Nasenrücken reichen und in seine Richtung zeigen.

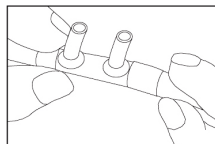

3. Positionieren Sie die Nasensonden und ziehen Sie den Schlauch über Ihre Wangenknochen.



4. Legen Sie den Schlauch um Ihre Ohren und passen Sie jede Seite so an, dass Sie einen passgenauen und bequemen Sitz haben. Lassen Sie den Schlauch nicht vollständig um Ihren Hals herum verlaufen. Dies kann zu Erstickungsgefahr führen.

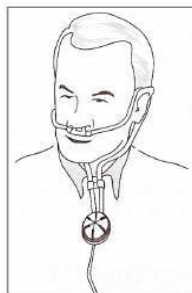

5. Befestigen Sie den Schlauchclip, um beide Seiten des Kanülenrohrs zu verbinden. Schieben Sie den Clip unter Ihrem Kinn nach oben, um den Schlauch an seinem Platz zu halten (Sie können auf die Verwendung des Clips verzichten, indem Sie ihn einfach entfernen).









6. Der Pendant sollte gegen die Brust unterhalb der Kehle anliegen. Möglicherweise werden Sie es vorziehen, ihn unter Ihrem Hemd oder Ihrer Bluse zu tragen.

7. Verbinden Sie die Buchse mit Ihrer Sauerstoffquelle.

8. Schalten Sie den Sauerstoff ein und stellen Sie die Durchflussmenge wie von Ihrem Arzt oder medizinischen Fachpersonal vorgeschrieben ein.

HINWEIS: Die zur Verwendung mit diesem Gerät verordnete Durchflussrate kann ein Viertel bis zur Hälfte derjenigen betragen, die mit einer nicht sauerstoffsparenden Kanüle verordnet wird.

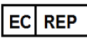WARNUNG: Dieses Gerät ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Patienten vorgesehen und darf vom selben Patienten mehrfach verwendet werden. Die gemeinsame Nutzung dieses Geräts mit anderen Personen kann Ihr Risiko für Atemwegsinfektionen oder andere übertragbare Krankheiten erhöhen.

	Rauchen verboten		Trocken halten
	Von offener Flamme fernhalten		Nur auf Verschreibung
	Europäische Vertretung		CE-Konformitätskennzeichnung
	Katalognummer		Chargennummer

ERSATZ

Der OXYMIZER Pendant sollte nach ungefähr drei Wochen ersetzt werden. Je nach den Nutzungsbedingungen muss für Sauberkeit und Hygiene ein häufigerer Austausch erforderlich sein.

HEUTIGES DATUM:	ERSETZEN AM:
-----------------	--------------

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an den Hersteller, um ein unerwartetes Betriebsverhalten oder unerwartete Ereignisse zu melden.

ZUSÄTZLICHE BEFEUCHTUNG

Eine zusätzliche Befeuchtung wird häufig für die Verwendung mit einer Nasenkanüle empfohlen. Dies wird üblicherweise durch das Anordnen eines geeigneten Sauerstoffbefeuchters zwischen der Sauerstoffquelle und der Kanüle erreicht. Da die OXYMIZER-Kanüle einen wesentlich geringeren Sauerstofffluss als Standard-Nasenkanülen verwendet, besteht möglicherweise nur eine verringerte oder gar keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Befeuchtung. Befolgen Sie den Empfehlungen Ihres Arztes bezüglich der Verwendung von Befeuchtern.

REINIGUNG

Die sauerstoffsparenden OXYMIZER Einweggeräte sind sauber und gebrauchsfertig und werden in individuellen Behältern geliefert. Die äußere Oberfläche kann je nach Bedarf mit Seife und Wasser gereinigt werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Membran innerhalb des Reservoirs nicht nass wird

OXYMIZER® PENDANT
DISPOSABLE OXYGEN-CONSERVING DEVICES

REF #P-224

ZUR VERWENDUNG IN DER SAUERSTOFFTHERAPIE

EINWEGPRODUKTNUR FÜR DEN EINPATIENTEN-GEBRAUCH
GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DEN BETRIEB BEIGEFÜGT

INHALT: Ein (1) sauerstoffsparendes OXYMIZER Pendant Einweggerät mit gebogenen Nasenröhren, sechs (6) Fuß Verbindungsschlauch, eine Buchse und Benutzerhandbuch.

(01)00814470020112



LOT

VERWENDUNGSZWECK

Das Gerät ist dazu vorgesehen, als Teil eines tragbaren oder stationären Sauerstoffsystems für Patienten, die zusätzlichen Sauerstoff in ihrem Heim und zur ambulanten Verwendung benötigen, verwendet zu werden.

GEGENANZEIGEN

- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder geeignet
- Nicht für Patienten mit verstopfter Nase geeignet
- Nicht für Patienten mit Gesichtsverletzungen, welche die Verwendung einer Kanüle ausschließen, geeignet
- Nicht für Patienten geeignet, welche die Nasenkanüle nicht an ihrem Platz belassen
- Nicht für die Wiederverwendung durch mehrere Patienten geeignet
- Nicht zur Verwendung mit Sauerstoffversorgungssystemen mit Stoßdosierung geeignet

ENTSORGUNG

Die Entsorgung Ihres Geräts sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften erfolgen.

SPEZIFIKATIONEN

Max. interner Druck	345 kPa (3,45 bar, 50 psi)
Max. Durchfluss (LPM)	15 LPM
Betriebstemperatur	15°C bis 40°C (41°F bis 104°)
Betriebsfeuchtigkeit	15% bis 93%, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur	-25°C bis 70°C (-13°F bis 158°F)
Lagerungsfeuchtigkeit	<=93%, nicht kondensierend

Die erwartete Nutzungsdauer beträgt 21 Tage.

WARNUNG: Um eine Strangulation zu vermeiden, halten Sie die Schläuche von Kindern und Haustieren fern und beaufsichtigen Sie beeinträchtigte Personen. Wickeln Sie den Schlauch NICHT um den Hals.

HERGESTELLT FÜR:



Inovo, Inc.
401 Leonard Blvd. North
Lehigh Acres, FL 33971

Gebührenfrei: 877-224-0946
www.drivedevilbisshhealthcare.com

MDSS Schiffgraben 41
Hannover 30175, Deutschland
Tel. 49-511-6262-8630



EC REP

© 2018 Inovo, Inc.
Hergestellt in China

PM-00053/20/G